


STERIHEEL BABY

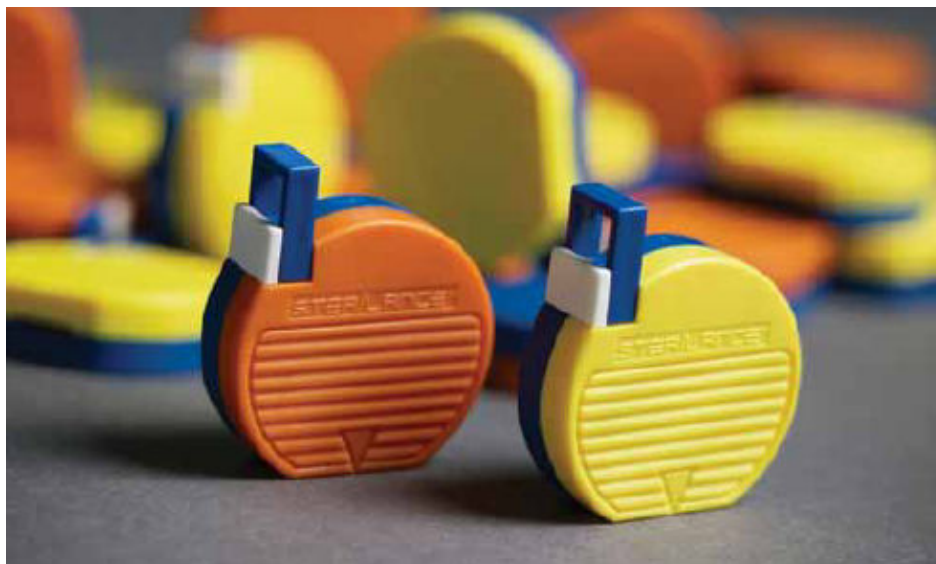

Per ottenere un campione ottimale di sangue con la minima profondità di penetrazione e:

- 1) Sicurezza per il personale: la lama rimane completamente coperta dopo l'uso.
- 2) Vantaggi:
 - a. Pulsante di attivazione precaricato;
 - b. Monouso, non può essere riutilizzato;
 - c. Sterilizzato con raggi gamma;
 - d. Controllo della profondità di penetrazione.
- 3) Confort per il paziente: lama estremamente tagliente con un'alta rapidità di azione che minimizza il trauma e comporta una veloce rimarginazione.
- 4) Elevata quantità di sangue: il movimento controllato della lama ottimizza il flusso di sangue.
- 5) Applicazione: prevalentemente neonati e prematuri. Possono essere anche raccomandati per altre applicazioni quando è importante ridurre la profondità di penetrazione e la compressione dei tessuti.

COLORE	SPECIFICHE	APPLICAZIONI	COD / CONF
GIALLO	PROFONDITA' INCISIONE 1.0MM LUNGHEZZA INCISIONE 2.5MM	NEONATO	V05-031025 / 200pz
ARANCIONE	PROFONDITA' INCISIONE 0.85MM LUNGHEZZA INCISIONE 1.75MM	PREMATURO	V05-038575 / 200pz

PACCHETTO DA 50 PEZZI, CONFEZIONE DA QUATTRO PACCHETTI PER UN TOTALE DI 200 PEZZI

Attenzione:

non usare se il cappuccio protettivo è stato rimosso o se la confezione è danneggiata



1. Estrarre la levetta di sicurezza



2. Zone sul tallone suggerite per il prelievo del campione di sangue



3. Premere il dispositivo fermamente contro il tallone e rilasciare la lancetta



4. Raccogliere il sangue con un capillare



5. Gettare il dispositivo in un contenitore adeguato